



感謝您選購測利得血糖檢測系統GV 01，作為日常監測血糖的便利工具。使用前請先詳閱操作說明書，若有任何疑問，請與我們或當地經銷商聯絡。

第1章 關於本產品

效能

測利得GV 01血糖儀是利用電化學生物感測技術製成，僅可與測利得GV 01血糖試片搭配使用，提供糖尿病患者居家檢測微血管全血的血糖值。並可在專業人員操作下，檢驗成人微血管、靜脈血及新生嬰兒全血之血糖值。

產品特性

本血糖儀採用電化學生物感測技術製成，比傳統光學檢測法更靈敏、精確。血糖試片採用毛細原理，當血液輕觸試片採血端時，血液會自動吸入試片反應區內並開始測試，所需血量0.6μL，並在5秒內顯示血糖值，不需讀秒、滴血與擦血，讓您使用更加安心與方便。

IVD 本產品為自我量測血糖值之體外診斷醫療器材（in vitro diagnostic medical device）。本產品僅適用於血糖測試，不可用於其他用途，不可作為診斷糖尿病的依據。

量測原理

血糖與試片內的化學物質接觸時會產生一個微弱電流，電流的強弱會一量測的血糖多寡而變化，血糖儀即會依電流的強弱換算出您的血糖值，並於螢幕上顯示。

量測追溯性

試紙是由靜脈血漿校正，試紙的量測範圍為10~600 mg/dL，解析度為1.0 mg/dL。

關於靜脈血漿校正的涵義請見下述說明。

1. 首先選用YSI 2747葡萄糖標準液作為追溯用之標準品，其具有可追溯至美國國家標準與技術研究院（NIST）認可之葡萄糖標準液。
2. 接著選用已通過YSI 2747葡萄糖標準液校正之YSI 2300葡萄糖分析儀作為校正用之參考機器。
3. 將測利得GV 01血糖儀量測的微血管全血資料與YSI 2300葡萄糖分析儀量測的靜脈血漿資料比對後，完成校正程序。
4. 當受測樣本血糖濃度高於100 mg/dL時，YSI 2300的量測不確定度為0.289 mg/dL；受測樣本血糖濃度低於100 mg/dL時，YSI2300的量測不確定度為0.029 mg/dL (1 mmol/L= 18 mg/dL)。

產品包裝內容

測利得GV 01血糖檢測系統，包含以下物件：

1. 測利得GV 01血糖機
2. 測利得採血筆
3. 測利得GV 01血糖試片*
4. 測利得 (GV系列)葡萄糖品管液*

標註*者為選購品，購買本系統時請以外盒標示之內容物為準。請勿搭配使用其他品牌或型號的血糖試片或品管液。

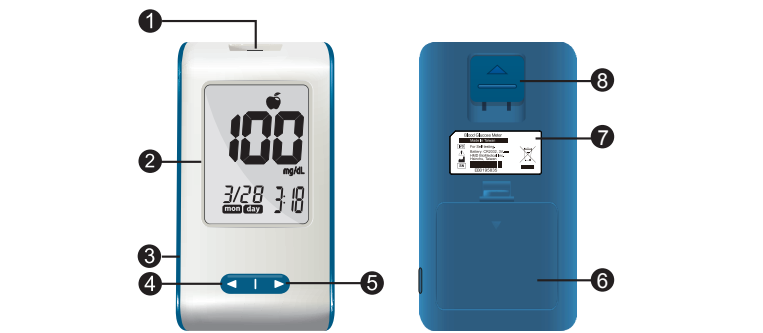
△注意事項：

- 您量測的血糖值僅供參考，不適用於糖尿病的最終診斷，請勿自行採取任何醫療措施，若有任何疑問，請先諮詢醫師或專業醫護人員。
- 如果使用靜脈血、新生兒血，必須由專業醫護人員採集，方可使用。
- 本系統可用於檢測新生兒血，建議您基於良好的臨床操作規範，並依照貴機構對新生兒危急血糖值訂定的追蹤照護原則執行作業。
- 當血糖檢測結果與病患感受的症狀不符時，請重複檢測，若檢測結果仍然

相同，馬上向您的醫生或專業醫護人員諮詢。


- 極度口渴或嚴重脫水時可能會造成昏迷或量測時出現低血糖值，當病患上述症狀時請馬上向醫生求助。
- 本產品之血容積比（HCT血液中紅血球的比例）範圍為0%~70%。當血容積比超過以上範圍時，量測結果可能不準確，請先詢問醫師後再測試。
- 在高海拔的環境下測試時，可能造成量測不準確。
- 血液中含有高濃度的對乙酰氨基酚（>5 mg/dL），抗壞血酸（>3 mg/dL），膽紅素（>12.5 mg/dL），尿酸（>8 mg/dL）和普利多酮碘化物（>2 mg/dL）等還原物質時，可能會造成量測不準確，請先諮詢醫師後再測試。
- 請在8°C~44°C（46.4°F~111.2°F）的溫度範圍內量測血糖值。
- 本產品僅能與測利得GV 01血糖試片搭配使用。
- 在海拔為3,150米（10,334英尺）以上的高度得到的檢測結果可能不準確。

第2章 血糖儀介紹




1. 試片插槽：此處提供血糖試片與血糖儀檢測片插入。
2. 螢幕：顯示檢測結果和其他重要訊息。
3. 數據端口：可將螢幕訊息傳輸到智能手機以進行查看及分析。（傳輸線請單獨購買）
4. **◀** 鍵：按 **◀** 鍵（左邊按鍵）進入日期與時間設定模式。
5. **▶** 鍵：按 **▶** 鍵（右邊按鍵）進入記憶回讀模式。
6. 電池座：您新購的血糖儀包裝盒內附有一顆新電池（型號CR2032），請先裝入電池後再開始測試。
7. 血糖儀序號。
8. 退片鍵：方便取出檢測後試片。

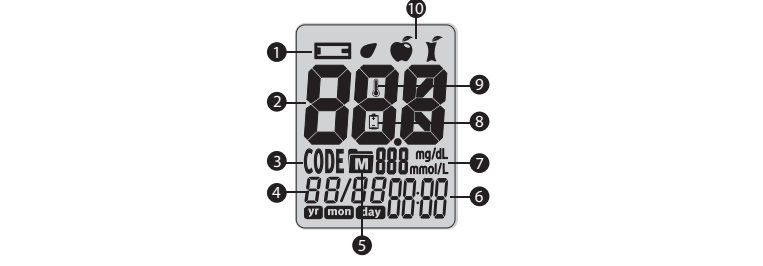第3章 血糖儀螢幕




1. 試片符號：當試片插入血糖檢測系統，機器備妥並等待檢體吸入時顯示。
2. 檢測值。
3. Code：密碼。
4. 日期：月/日。
5. **M** / **M** 回讀單筆記憶值時顯示。
6. 時間：時/分，24小時制。
7. mg/dL mmol/L：量測單位，本機器提供二種量測單位選擇，出廠前的預設單位mg/dL。
8. 電池符號：電池耗弱時顯示。
9. 溫度警示：當周圍環境溫度超出允列範圍時顯示，請先移機至10°C~40°C溫度範圍內，並靜待30分鐘以上，等訊號消失後再測試。
10. **🍏** / **🍗** / **🍷** 符號：可設定量測情境為飯前（AC **🍏**），飯後（PC **🍗**），品管液測試（QC **🍷**）。

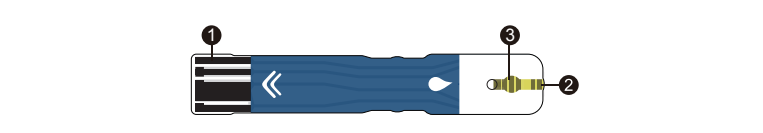第4章 血糖試片



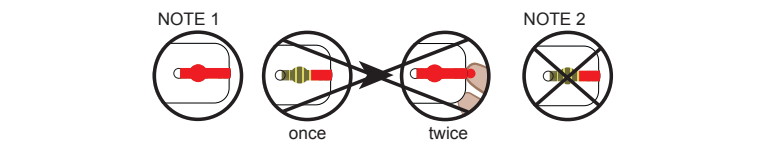1. 試片電極：請由此端插入試片到試片插槽。
2. 反應區：當足夠血量吸入後，血液會完全覆蓋此區，此時才能測得最準確血糖值，採血時請提供充足血量，並確認血液完全覆蓋此區，勿二段式吸血。（如下圖）
3. 吸血孔：血液輕觸試片前端的吸血孔，血液會自動吸入。請勿在膠片上直接滴血或將膠片撕開滴血。




請注意1：請勿在同一試片中重複採集兩次血液，請儘可能的採集較大的血滴。

請注意2：如果採集的血流量太小，血糖儀會顯示的血液不足之錯誤代碼“E42”。請查看本說明書第14章節訊息顯示與故障排除之說明。

△ 注意事項：

- 測利得系統可測量微血管，靜脈和新生嬰兒全血中的葡萄糖含量。可以將血液加到試紙的前面，且血液會自動吸入。
- 測利得血糖試片適用於微血管，靜脈和新生嬰兒全血或測利得血糖控制溶液的體外診斷。如果與血漿或血清一起使用，結果將不準確。
- 含有抗凝劑K2EDTA (K2E) 或肝素鈉的新鮮靜脈血是可以接受的。不建議使用碘乙酸鹽或含氟的抗凝劑。
- 未開封的保存期限標示於罐身或單片鋁箔包上標籤，請勿使用過期試片量測血糖。
- 血糖試紙可能會因熱和光而損壞。請勿放置在高溫或陽光直射的地方。
- 請存放試片於原裝罐內，並儲存在2°C~30°C（35.6°F~86°F）的乾爽陰涼處，不要冷藏。
- 初次開啓試片罐時，請標記拋棄日期於罐身標籤上，試片拋棄日期為：首次開罐日起算之90天。
- 取出試片後應立即使用，並馬上蓋回罐蓋以免試片受潮。
- 請勿將試片轉移到新的試片罐中，始終將試片放在原裝罐中。
- 勿以任何方式彎曲或破壞血糖試片。
- 請依醫療器材廢棄物法規丟棄用過的血糖試片。
- 每片試片僅能使用一次，請勿重複使用。

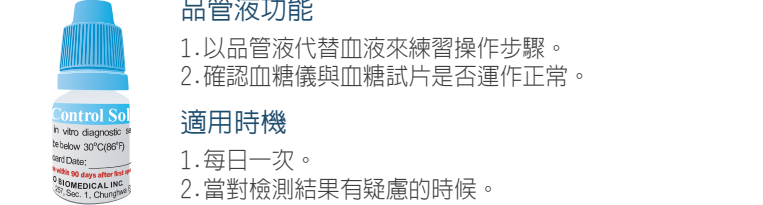第5章 葡萄糖品管液（選購品）



△ 注意事項：

- 未開封的保存期限標示於瓶身標籤，請勿使用過期的品管液測試。
- 品管液使用完畢後請將瓶蓋蓋回並旋緊，並存放於10°C~30°（50°F~86°F）。

品管液檢驗步驟

1. 取出試片，手握試片前端插入試片插槽（試片取出後，請立刻蓋回罐蓋）。
2. 確認密碼與試片罐標籤的密碼一致。如不一致，請參閱第8章設碼步驟。
3. 按 **▶** 鍵（右邊按鍵）大於3秒選擇“**QC**”模式。
4. 輕輕搖動葡萄糖品管液，並在試管孔上滴一滴。確保葡萄糖控制溶液已使血液反應區飽和。
5. 測試結果將在5秒鐘內顯示出來，對照試片罐標籤的品管液範圍與檢測結果，確認檢測值是否落於範圍內，當結果落於範圍內，表示產品運作正常；若結果落於範圍外，請重複檢測，若第二次的檢測結果仍然落於範圍外，請與我們客服人員聯絡。

△ 注意事項：

如果結果超出控制範圍，請重複測試。如果您繼續使結果超出控制範圍，則您的血糖儀和試片可能無法正常工作。在控制範圍內獲得測試結果之前，請勿使用該系統測試您的血液並請與您的當地經銷商聯繫。

第6章 時間設定

適用時機

1. 當您需設定正確時間日期時。
2. 當您每次換新電池時，血糖儀會自動進入時間設定模式。請依以下步驟設定時間與日期。

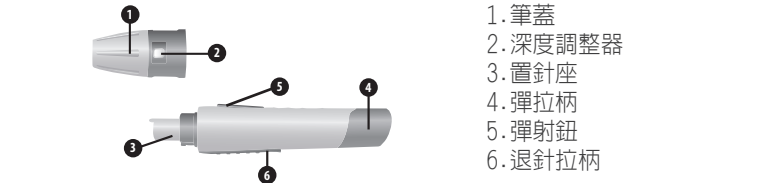
設定時間日期的步驟

1. 首次將電池安裝到儀表中時，儀表將自動進入設置模式。在開始測試之前，請設定正確的時間和日期。
2. 發出嗶聲時，“2021”年將閃爍，按“**◀**”鍵（左邊按鈕）和“**▶**”鍵（右邊按鈕）以選擇所需的年份。
3. 等待數字閃爍三下，然後自動切換到下一個設置。
4. 重複步驟2~3，透過“**◀**”鍵（左邊按鈕）和“**▶**”鍵（右邊按鈕）設定月份、日期與時、分。
5. 當時間設定完成，機器會顯示“OK”並自動關機。

第7章 準備採血

六段式採血筆 “天津華鴻科技”採血筆（未滅菌）（許可證字號：衛部醫器陸輸壹字第003770號）

請利用採血筆與採血針來採集指尖血液



採血針 “天津華鴻科技”採血針（滅菌）（許可證字號：衛署醫器陸輸壹字第001955號）

您可用28G針頭或30G針頭來採血。



△ 注意事項：

1. 每個採血針僅能使用一次，請勿重複使用。
2. 請保持採血筆與採血針的清潔。
3. 請小心使用採血針以免刺傷他人，並依醫療器材廢棄物法規丟棄用過的採血針。
4. 採血筆與採血針均符合歐洲醫療器材法規MDD 93/42/EEC指令，製造商聯絡資訊與歐規符號，詳產品標籤或包裝說明。

裝置採血筆





1. 裝入採血針 將採血筆蓋轉開，將採血針裝入針座內。	
2. 轉開針蓋 輕輕將採血針上的針蓋轉開，把採血筆蓋裝回。	
3. 設定採血的深度轉動筆蓋上的深度調整器來選取適當的採血深度。 注意：數字越大表示採血越深，1表示採血最淺，6表示最深。	
4. 採血筆上膛 將採血筆的彈拉柄往後拉，直到聽到一聲喀擦聲響後放開。	

第8章 設碼步驟

首次使用血糖儀或每次打開新的試片盒之前，都需為血糖儀“匹配”試片。這步驟稱為“設碼”。

1. 從試片罐內取出新試片（試片取出後，請立刻蓋回罐蓋），手握試片前端插入試片插槽。	
2. 確認密碼與試片罐標籤上的密碼一致（如圖），若不一致，請聯繫血糖儀供應商。	
3. 按“ ◀ ”鍵（左邊按鈕），直到聽到蜂鳴器的聲音並且代碼值閃爍，然後按“ ▶ ”鍵（左邊按鈕）獲取新測試條樣品瓶上指示的代碼號。	
4. 獲取正確的代碼號後，按“ ▶ ”鍵（右邊按鈕）以確認。當“ 🍏 ”符號閃爍時，即可進行血糖測試。 注意：新的設置代碼號也顯示在屏幕上。	

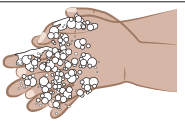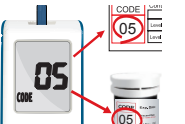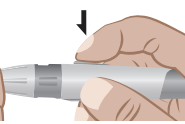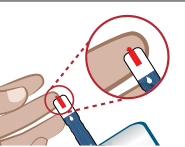第9章 血糖測試步驟

1. 請清洗雙手或以酒精棉片擦拭指尖採血部位，採血前採血點一定要乾淨與乾燥。	
2. 從試片罐內取出新試片（試片取出後，請立刻蓋回罐蓋），手握試片前端插入試片插槽。	
3. 確認密碼與試片罐標籤上的密碼一致。如不一致，請參閱上一章節設碼步驟。	
4. 血滴符號出現時，表示可開始做血糖測試。	
5. 檢測前您可以按一下“▶”鍵（右邊按鈕）設定此筆檢測值的模式為飯前（🍏）、飯後（🍷）或按超過3秒鐘品管液（🧪）。若未設定模式，螢幕自動顯示為飯前（🍏）模式。	
6. 將已裝入採血針的採血筆輕按壓在欲採血的部位，按下彈射鈕進行採血。輕按採血部位的周圍並擠壓出一小滴血液（僅需0.6微升的血量）。	
7. 將試片前端的吸血孔輕觸待檢測的血液，直到反應區充滿血液為止。	
8. 血糖值將在5秒內顯示在螢幕上。	
9. 檢測完成後推一下血糖儀背後之退片裝置將試片推出。用過的採血針與血糖試片請依醫療器材廢棄物法規丟棄。	
10. 本血糖儀的血糖量測範圍為10~600 mg/dL（0.6~33.3 mmol/L）。若血糖值低於10 mg/dL（0.6 mmol/L）時，血糖儀會出現“LO”訊息；若血糖值高於600 mg/dL（33.3 mmol/L）時，血糖儀會出現“HI”訊息。	

第10章 異常訊息

正常成人飯前血糖值應該為70~105 mg/dL（3.9~5.8 mmol/L）¹，飯後二小時血糖值應該小於140 mg/dL（7.7 mmol/L）²。當檢測結果偏高或偏低時，可能：

時間	正常成人血糖範圍	1. American Diabetes Association: Classification and Diagnosis of Diabetes. Set. 2. Standards of Medical Care in Diabetes-2016. Diabetes Care, 39（Suppl. 1）, S13-S22, 2016.
飯前	低於100 mg/dL	
飯後	低於140 mg/dL	

- 對於糖尿病患者，請諮詢您的醫療保健專業人員以了解您的目標血糖值。如果您的血糖結果異常高或低，或與先前的結果不一致，請檢查以下各項：
1. 檢查試片罐標籤上的密碼是否與機器上的密碼一致？
 2. 檢查血糖試片取出後是否馬上使用？
 3. 檢查血糖試片的反應區是否有吸取足夠的血液？
 4. 檢查血糖試片瓶蓋是否有蓋緊？
 5. 檢查血糖試片是否在保存期限內使用？
 6. 是否依指示存放2°C~30°C溫度下，且避免受潮或避免高溫曝曬？
 7. 用測利得葡萄糖品管液檢查血糖儀與試片是否運作正常？

若以上均確認無誤，但第二次血糖檢測的結果仍然出現異常時，請馬上向醫師或專業的糖尿病醫護人員諮詢。

第11章 記憶回讀

測利得GV 01血糖儀可自動儲存800筆測試值，並可讓您依序回讀從最新到最舊的檢測值。

回讀記憶

1. 按“▶”鍵（右邊按鈕）打開機器，直到聽到提示音。螢幕上顯示的第一個結果是您的最新測試結果。📄 012代表該機器的總體結果的第12個記錄。
2. 此時按一下“▶”鍵（右邊按鈕/記憶按鈕），您將看到從最新到最早的測試記錄，按 ◀ 鍵（左邊按鍵/設置按鈕），您將能夠看到7天、14天、21天與28天的平均值。
3. 請按“▶”鍵（右邊按鈕）2秒鐘關機，或將其擱置3分鐘以自動關機。

注意：在記憶模式下，任何時候您都可以按“▶”鍵（右邊按鈕）直到聽到提示音並關閉電源。

第12章 系統規格

1	血液樣本型式	新鮮採出的微血管/靜脈/新生嬰兒全血
2	樣本體積需求量	0.6 微升
3	測試時間	5秒
4	測試範圍	10~600 mg/dL（0.6~33.3 mmol/L）
5	機器操作條件	溫度：8°C~44°C（46°F~112°F） 溼度：90%以下
6	機器保存條件	溫度：-20°C~70°C（-4°F~158°F） 溼度：90%以下
7	機器運輸條件	溫度：-20°C~70°C（-4°F~158°F） 溼度：90%以下
8	記憶容量	800 筆測試值
9	省電裝置	3 分鐘內無動作自動關機
10	電源	3 伏特鋰電池一顆（電池型號CR2032）
11	螢幕	LCD
12	血糖機尺寸	90 × 45 × 15mm（LWH）
13	重量	大約 50g
14	平均功能	自動平均7天，14天，21天，與28天的記憶值

第13章 保養血糖儀

清潔機器與保存

一般而言，您不需要對機器特別照顧，只要您避免摔碰機器，保持機器的乾燥清潔，將機器安置於攜帶包內存放即可，以確保機器無灰塵。如果需要清潔或消毒，請仔細遵循以下準則，以幫助您獲得最佳性能。

請遵循
• 確保儀表關閉
• 建議以高樂氏（CLOROX）殺菌濕紙巾輕輕擦拭。
※ 不允許任何液體進入儀表的插槽
※ 不要將清潔溶液直接噴到儀表上
※ 不要將儀表浸入液體中

電池耗弱顯示

1. 購買的血糖儀於包裝盒內附有一顆新電池（電池型號CR2032），請先裝入電池後再開始使用。此電池約可做1,000次測試（以一天三次血糖測試的假設，約可用12個月），但實際電池壽命依據您的使用狀況不同。
2. 當您看到螢幕上出現電池警示符號時，表示電池的電力已經不足，此時您還是可以做血糖測試，但建議您儘快換新電池。
3. 當電池警示符號開始閃爍時，表示電池已經完全失去電力，無法做血糖檢測。請馬上更換新電池。

注意：每次更換電池時，儀表都會自動打開並輸入時間/日期設置。在測試之前，請先設置正確的時間和日期。

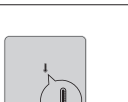
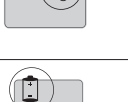
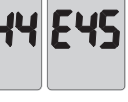
裝入或更換電池

1. 確認儀器在關機狀態。將血糖機背面朝上，將電池蓋取下。
2. 取出舊電池。
3. 將新電池正極朝上（符號“+”為正極），裝入電池座內。

4. 蓋回電池蓋，並檢查血糖機是否能正常開機，此時儀器應自動進入時間設定模式。若無法正常啟動，可能是您剛剛裝入的電池正反面錯誤，請依照以上指示檢查與重新裝置電池。

第14章 訊息顯示與故障排除

閱讀以下訊息顯示與故障排除可讓您對本產品更了解。當血糖儀出現任何顯示訊息時，請先對照下表並依指示排除故障。如果出現以下頁面清單未列出的錯誤訊息，請與當地的經銷商聯繫以尋求幫助。故障維護只能由製造商授權和訓練有素的人員進行。

訊息顯示	提示意義	處理方式
	開機時均會顯示此畫面，此時機器在進行自我偵測	檢查是否螢幕內每個數字與符號均能正常顯示。若有任何數位或符號顯示不正常時，請與您當地的經銷商聯繫。
	血糖值高於600 mg/dL 或33.3 mmol/L.	血糖值非常高，請重複測試，若第二次的檢測結果仍為“HI”，詳第10章或與醫生連絡！
	血糖值低於10 mg/dL或0.6 mmol/L.	血糖值非常低，請重複測試，若第二次的檢測結果仍為“LO”，詳第10章或與醫生連絡！
	環境溫度已經超過血糖儀的操作溫度範圍	移機至8°C~44°C（46°F~112°F）溫度範圍內，並靜置機器30分鐘以上，等待訊號消失後再開始測試，如果此訊息無法消除，請與當地的經銷商聯繫以尋求幫助。故障維護只能由製造商授權和訓練有素的人員進行。
	電池符號出現時，表示電池耗弱。當電池符號出現並閃爍時，表示電池電力耗盡	儘快換新電池。
	試片已經毀損	插入新試片重新測試。
	試片已經用過或測試步驟不正確	1. 插入新試片並依正確檢驗步驟量測血糖。 2. 如果此訊息無法消除，請與當地的經銷商聯繫以尋求幫助。故障維護只能由製造商授權和訓練有素的人員進行。
	1. 試片操作程序不正確 2. 試片反應區血量不足 3. 試紙不良 4. 儀表損壞	1. 請依程序，等待吸血符號出現後才吸入血液。 2. 請在出現錯誤代碼之前，將血液補吸滿到同一樣本反應區。 3. 請準備更多的血量，並插入新試片，並依正確檢驗步驟量測血糖。 4. 如果此訊息無法消除，請與當地的經銷商聯繫以尋求幫助。故障維護只能由製造商授權和訓練有素的人員進行。
	1. 電池沒電或安裝不正確 2. 試片插反面或未完全插到底，或插入其他廠牌試片 3. 血糖儀故障	1. 更換新電池或電池安裝不正確 2. 如果此訊息無法消除，請與當地的經銷商聯繫以尋求幫助。故障維護只能由製造商授權和訓練有素的人員進行。
	血液吸入試片後，血糖儀並未開始檢測	1. 檢查試片的反應區是否被血液填滿，試片是否完好且有效。 2. 如果此訊息無法消除，請與當地的經銷商聯繫以尋求幫助。故障維護只能由製造商授權和訓練有素的人員進行。

第15章 產品表現特性

可重複性

測試是由訓練有素的技術人員在實驗室中進行的。將一名受試者的靜脈全血調節至5個不同的濃度。測試了3批試紙。結果如下表所示。

Level	No. of tests	YSI（mg/dL）	Mean（mg/dL）	Coefficient of Variation（%）
1	300	36.9	35.4	4.8%
2	300	92.9	94.4	4.0%
3	300	130.0	133.4	3.0%
4	300	223.8	211.7	3.1%
5	300	328.0	301.5	3.0%

中間精度

測試是由訓練有素的技術人員在實驗室中進行的。將來自一名受試者的葡萄糖對照溶液樣品調節至3個不同濃度。測試了3批試紙。結果如下表所示。

Level	No. of tests	YSI（mg/dL）	Mean（mg/dL）	Coefficient of Variation（%）
1	300	45.0	43.2	4.6%
2	300	100.0	107.5	4.3%
3	300	300.0	289.6	4.2%

系統準確度

醫護人員在醫院對600份葡萄糖濃度為25~528 mg/dL的樣品進行了檢測。將新鮮的手指全血樣品用測利得系統進行測試；並使用YSI 2300型葡萄糖分析儀作為參比，對受試者的血漿樣品進行測試。結果如下表所示。

Glucose concentration < 100 mg/dL（5.6mmol/L）		
Within ± 5 mg/dL（0.28 mmol/L）	Within ± 10 mg/dL（0.56 mmol/L）	Within ± 15 mg/dL（0.84 mmol/L）
102/168（60.7%）	155/168（92.3%）	168/168（100%）
Glucose concentration ≥100 mg/dL（5.6 mmol/L）		
Within ± 5%	Within ± 10%	Within ± 15%
210/432（48.6%）	369/432（85.4%）	420/432（97.2%）
Within ± 15 mg/dL or ± 15%（Within ± 0.83 mmol/L or ± 15%）		
588/600（98.0%）		

用戶性能分析

由非專業人士共360人，在醫院從指尖取得微血管血樣進行了檢測。每個人都測試了3片試片。測試結果顯示，與參考測量值（YSI 2300）相比，96.3%的葡萄糖結果落在±15 mg/dL（在葡萄糖濃度<100 mg/dL）和±15%（在葡萄糖濃度≥100 mg/dL）之內。

Within ± 5 mg/dL or ± 5%（Within ± 0.28 mmol/L or ± 5%）	Within ± 10 mg/dL or ± 10%（Within ± 0.56 mmol/L or ± 10%）	Within ± 15 mg/dL or ± 15%（Within ± 0.83 mmol/L or ± 15%）	Within ± 20mg/dL or ± 20%（Within ±0.83mmol/L or ± 15%）
625/1080（57.9%）	915/1080（84.7%）	1040/1080（96.3%）	1080/1080（100%）

	製造批號		保存溫度範圍
	警語，請參閱附件說明		請勿重複使用
	請勿曝曬在陽光下		生物危害標示，丟棄本產品時須向當地衛生機關詢問處置方式
	使用前請先詳閱說明書		本產品為體外診斷用醫療器材
	保存期限		序號
	製造業者		廢棄的血糖檢測系統必須被丟棄在有WEEE標示的容器中，請遵照當地法規，採取適當的保護措施處理所有廢棄物

製造商與客戶服務資訊：

 醫療器材商及製造業者：
厚美德生物科技股份有限公司
地址：新竹縣新埔鎮民生街181號
客服電話：0800535899
衛部醫器製字第007570號

採血筆：
“天津華鴻科技”採血筆(未滅菌)
衛部醫器陸輸壹字第003770號